

Pflegehinweise für Implantatgetragene Krone

Die tägliche Pflege Ihres Zahnersatzes bringt Ihnen Vorteile, die für Sie im Alltag wichtig sind: Gutes Aussehen, angenehmer Tragekomfort, Sicherheit und Wohlbefinden.

1. Zahnbürste

Es könnte nötig sein, für die Reinigung der Zahninnenseiten und der schlecht erreichbaren Bereiche die Bürste zu wechseln. Eine elektrische Zahnbürste ist eine gute Alternative und leicht zu handhaben. Wenn Sie eine Brücke tragen, dann vergewissern Sie sich, dass Sie deren Unterseite gut reinigen.

2. Bürste mit langen Borsten an der Spitze (Zwischenraumbürste)

Eine weiche Bürste mit langborstigem Ende (Zwischenraumbürste) ist für schwer erreichbare Regionen rund um Ihren implantatgestützten Zahn bzw. für die Zahninnenseiten geeignet, außerdem für die Außenseiten der Implantatpfosten Ihrer implantatgestützten Zähne.

3. Interdentalbürste (Interproximalbürste)

Die Anwendung einer Interdentalbürste hilft bei der Reinigung der Seitenflächen implantatgestützter Zähne, Kronen und Abutmentpfosten sowie im Bereich unterhalb der Brücke. Führen Sie die Bürste in einer Vorwärts-Rückwärts-Bewegung und drücken Sie sie dabei sanft gegen die Seite des implantatgestützten Zahns bzw. des Abutmentpfostens.

Die Bürste sollte weder zu klein, was den Reinigungseffekt mindern würde, noch zu groß sein, was beim Putzen unangenehm wäre. Kunststoffbeschichtete Borsten sind empfehlenswert. Fragen Sie Ihren Zahnarzt oder Dentalhygieniker bezüglich Anwendung, Größe und Form Ihrer Bürste um Rat. HINWEIS: Benutzen Sie keine Zahnpasta in Kombination mit der Interdentalbürste.

4. Zahnseide

Für enge Zwischenräume, in denen die Interdentalbürste schwer einsetzbar ist, empfehlen wir Zahnseide. Reinigen Sie die Seiten Ihres implantatgestützten Zahns sowie die Abutmentpfosten, indem Sie dicke Zahnseide zwischen dem Implantatzahn und dessen Nachbarzähnen bzw. durch den Zwischenraum neben den Abutmentpfosten vor und zurückziehen. Reinigen Sie die Brücke am Übergang zum Zahnfleisch mit einer seitlichen Bewegung.

